

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Alcoscan AL 2500X - Elite



Jednotlivé časti detektora:

1. merací otvor
2. displej - zobrazovaný údaj ukazuje promile [‰] alkoholu v krvi
3. tlačidlo pre zapnutie

Postup merania :

1. Stlačte krátko (1 s.) tlačidlo pre zapnutie (3). Detektor začne na displeji odpočítavať číslice od 19, až pokým sa na displeji zobrazí 0. Počas tejto doby sa zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje na činnosť. Čas prípravy na meranie sa líši podľa prostredia, v ktorom sa nachádzate.
2. Nasad'te náustok na merací otvor prístroja nachádzajúci sa nad displejom v strede.
3. Pevne obopnite perami náustok a fúknite do prístroja silno a rovnomerne. Počas fúkania budete počuť dlhé pípnutie. Po asi 3 sekundách prístroj pípe 2x za sebou a na displeji začne preblikávať číslica 0. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí výsledok merania, zobrazený v ‰ (promile) alkoholu v krvi.
Pri použití náustku je možné použiť na vdychovanie vzduchu do náustku aj slamku. Je potrebné dbať na to, aby priemer slamky nebol menší ako vnútorný priemer užšej časti náustku, inak môže dôjsť k vniknutiu slamky do priestoru senzora a k poškodeniu senzora. Použitím slamky sa mierne zníži presnosť merania.
V prípade, že chcete použiť prístroj bez náustku, fúkajte do meracieho otvoru prístroja silno a rovnomerne po dobu približne 4 sekúnd. Celkový priebeh merania je rovnaký ako pri použití náustku, ale výrazne sa zníži presnosť merania. Odporúčame preto vždy pri meraní používať náustok.

Údaje na displeji sú udávané v ‰ (promile). V prípade, že ste požili veľmi malé množstvo alkoholu (koncentrácia je pod 0,1 promile), detektor nameria hodnotu 0,0 ‰.

Dôležité upozornenia :

1. Detektor AL 2500X - Elite je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne dôsledky.
2. Po zapnutí detektora sa zahrieva merací senzor. S fúkaním vyčkajte vždy, až kým prebehne inicializácia detektora.
3. Keď ste pili alkohol, počkajte pred použitím detektora najmenej 30 minút. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná iba z vašich pľúc a nie zo zvyšku alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.
4. Senzor detektora je veľmi citlivý, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu! Počkajte vždy aspoň dve minúty. Dym z fajčenia alebo alkohol môžu zničiť senzor detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti so silne znečisteným vzduchom. Nenalievajte žiadnu tekutinu do detektora, mohlo by dôjsť k zničeniu senzora.
5. Všeobecne platí, že senzory na detekciu alkoholu ovplyvňuje teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť nepresnosti v meraní. Tolerancia je okolo 10%.
6. Nevystavujte detektor extrémnym klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 až +40°C.
7. Pokiaľ sa na displeji zobrazí nápis „C“, zašlite prístroj dovozcovi na kalibráciu. Pre správne fungovanie detektora je nevyhnutné ho pravidelne kalibrovať.

Výmena batérie :

Batériu vymieňajte, keď na displeji blíkajú nápis „bat“. Kryt priestoru pre batérie je na spodnej strane prístroja. Vkladajte vždy len nové alkalické tužkové batérie AA. Podľa polarizačných znamienok + a - na kryte pre batérie sa uistite, že ste ich vložili správne.

Pozor: po zapnutí detektora sú na displeji zobrazené všetky symboly ako test. Neznamená to, že je nutné meniť batérie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Alcoscan AL 2500X - Elite

Špecifikácia:

Rozsah merania:	0,00% - 0,40%
Rozmery:	10,4 x 4,0 x 2,0 cm
Hmotnosť s batériami:	85 gramov
Typ senzora:	Advanced Semiconductor Oxide sensor
Čas prípravy na meranie:	Menej ako 1minúta
Čas reakcie	2 sekundy
Čas regenerácie:	10 sekúnd
Batérie:	2 x 1,5V AA alkalické
Životnosť batérií:	100 - 200 meraní
Prevádzková teplota	+10 - +40 °C
Presnosť	+/- 10%

Kalibrácia:	Doporučuje sa pri bežnom používaní po 6 mesiacoch. Kalibráciu vykonáva dovozca testera.
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Záruka:

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na iné straty (ušlý zisk atď.).

S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!

Záruka sa nevzťahuje na:

Závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
Závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení)
Závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva
Závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja
Prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu
Poškodenie počas transportu alebo nesprávnym skladovaním
Prirodzené opotrebenie senzora
Nutnosť kalibrácie detektora

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: 032 / 381 00 75

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je potrebné predložiť Záručný list a sprievodný list s popisom závady spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom!