

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SENTECH AL 2500



Jednotlivé časti detektora:

1. Vstup dychu (inhalátor)
2. displej – zobrazovaný údaj ukazuje promile [%] alkoholu v krvi
3. tlačítko - zapnutie

Postup merania:

1. Stlačte krátko (1 sek.) tlačítko ZAP (3). Detektor začne na displeji odpočítavať číslice až sa na displeji zobrazí 0,00. Behom tejto doby sa zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje k činnosti. Čas prípravy kuraniu sa líši podľa prostredia, v ktorom sa nachádzate.
2. Keď počujete dvojité pípnutie) zároveň sa na displeji zobrazí 0.00 okamžite začnite fúkať rovnomerne do detektora zo vzdálenosti cca 2 cm (2 sek.) Po pípnutí prestaňte fúkať do detektora. Výsledok testu je zobrazený na displeji do 2 sekúnd. Po 20 sekundách sa prístroj znova aktivuje a môžete vykonávať ďalšie meranie.
3. Údaje na displeji sú udávané v promilách. V prípade, že ste požili veľmi malé množstvo alkoholu (koncentrácia je pod 0,1 promile), detektor namerá hodnotu 0,00.

Dôležité upozornenia:

1. **Detektor AL 2500 Silver je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr.pracovno-právne dôsledky.**
2. Po zapnutí detektora sa zahrieva meracie čidlo. S fúkaním vyčkajte vždy, až kým prebehne inicializácia detektora.
3. Keď ste pili alkohol, počkajte pred použitím detektora najmenej 30 minút. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná iba z vašich pľúc a nie zo zbytkou alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.
4. Čidlo detektora je veľmi citlivé, **nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu!** Počkajte vždy aspoň dve minúty. Dym z fajčenia alebo alkohol môžu zničiť čidlo detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti zo silne znečisteným vzduchom. Nenaliievajte žiadnu tekutinu do detektora, mohlo by dôjsť ku zničeniu čidla.
5. Všeobecne platí, že čidlá na detekciu alkoholu ovplyvňuje teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť nepresnosti v meraní. Tolerancia je okolo 15%..
6. Nevystavujte detektor extrémnym klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 - +40 °C.

Výmena batérie:

Batériu vymieňajte, keď sa na displeji blíkajú nápis „bat“. Kryt priestoru pre batérie je na spodnej strane prístroja. Vkladajte vždy len nové alkalické tužkové batérie (Duracell). Podľa polarizačných známiensk + a - na krytu pre batérie sa uistíte, že ste ich vložili správne.

Pozor: po zapnutí detektora sú na displeji zobrazené všetky symboly ako test. Neznamená to, že je nutné meniť batérie.

Špecifikácia:

Rozsah merania	0,0 – 4,0 promile
Rozmery	10,4 x 4,0 x 2,0 cm
Hmotnosť	85 gramov
Typ senzora:	Advanced Semiconductor Oxide sensor
Čas prípravy k meraniu:	menej než 1 minúta
Čas reakcie	4 sekundy
Doba regenerácie:	20 sekúnd
Batérie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnosť batérie:	100 – 200 meraní
Prevádzková teplota	+10 – + 40C
Presnosť	+ / - 15 %
Kalibrácia:	Doporučuje sa pri bežnom používaní po 6 mesiacoch. Kalibráciu vykonáva dovozca alkohol testera.
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Záruka:

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú behom záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na vzniklé ideálne straty (ušlý zisk atď.). S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
- závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení)
- závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva
- závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja
- prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu
- poškodenie behom transportu alebo nesprávnym skladovaním
- prirodzené opotrebenie čidla
- nutnosť kalibrácie detektora

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: **032/381 00 75**

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je treba predložiť Záručný list a sprievodný list s popisom závady spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom!



Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

tel: **032/381 00 75**, fax: 032/230 16 81

e-mail: objednavky@tester.sk, web: www.testersk