

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Alcoscan AL 9000 Lite



Jednotlivé časti detektoru



Jednotlivé časti detektora:

1. Náustok k detektoru AL 9000
2. Trubica vzduchu dychu, tu vložte náustok
3. Displej – zobrazované údaje sú v promilách na 3 desetinách čísla
4. Tlačítko – zapnutie/vypnutie
5. Úchyt pre pútko na ruku
6. Vstup pre 12V kábel
7. Kryt batérií

Detekcia alkoholu:

Digitálny detektor alkoholu AL 9000 je zariadenie, ktoré je schopné merať hladinu alkoholu v ľudskom tele. Výsledky meraní ukazujú promile alkoholu v krvi.

Postup merania:



1. Stlačte krátko tlačítko (4). Pokiaľ budete tlačítko držať dlhšie, zobrazí sa na displeji počet nameraných hodnôt
2. Po uvoľnení tlačítka sa začne detektor zahrievať, počkajte do doby, než sa na displeji zobrazí „blow“
3. Akonáhle budete počuť pípnutie (zároveň sa na displeji zobrazí nápis „blow“), tak bezprostredne po tomto signáli fúkajte rovnomerne do náustku (1) pokiaľ budete počuť zvukové znamenie. Po dvojitom pípnutí prestaňte fúkať do detektoru. Pokiaľ ste fúkali krátko dobu, na displeji sa zobrazí nápis „Flo“ – meranie opakujte
4. Asi za 4 sekundy bude výsledok testu zobrazený na displeji. Údaje sú udávané v promilách.
5. Po zobrazení nameraných údajov sa detektor sám vypne po dobe 2 minút.
6. Pokiaľ chcete vykonávať ďalšie meranie, počkajte asi 30 sekúnd a postupujte podľa bodu 1-4.

Dôležité upozornenia:

1. Detektor AL 9000L je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne dôsledky.
2. Keď ste pili alkohol, počkajte pred použitím detektora najmenej 30 minút. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná iba z vašich pľúc a nie zo zvyšku alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.

3. Čidlo detektora je veľmi citlivé, **nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu!** Počkajte vždy aspoň dve minúty. Dym z fajčenia alebo alkohol môžu znížiť čidlo detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti zo silne znečisteným vzduchom. Nenalievajte žiadnu tekutinu do detektora, mohlo by dôjsť ku zničeniu čidla.
4. Platí, že čidlo na detekciu alkoholu ovplyvňuje teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť nepresnosti v meraní. Tolerancia je do 5%.
5. Nevystavujte detektor extrémnym klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 – +40 °C.
6. **Pokiaľ sa na displeji zobrazí nápis „CAL“ vymeňte senzor alebo zašlite prístroj dovozcovi ku kalibrácii.**

Výmena batérie:

Batériu vymieňajte, keď sa na displeji zobrazí nápis „bat“. Kryt priestoru pre batérie je na spodnej strane prístroja. Vkladajte vždy len nové alkalické tužkové batérie 1,5 V AA alkalické. Podľa polarizačných znamienok + a - sa uistite, že ste ich vložili správne.

Špecifikácia :

Rozsah merania	0,0 – 4,0 promile
Rozmery	116 x 50 x 20 mm
Hmotnosť	100 gramov
Batéria	2x 1,5V AAA alkalická
Senzor	Fuel Cell Senzor
Doba prípravy k meraniu	20 sek
Čas reakcie	5 sec
Prevádzková teplota	+10 – + 40C
Presnosť	5 % - aktívny režim
Životnosť batérie:	500 meraní
Kalibrácia:	doporučuje sa pri bežnom používaní po 6-tich mesiacoch. Kalibráciu vykonáva dovozca alkohol testera.
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Záruka:

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobu v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú behom záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na vzniklé ideálne straty (ušlý zisk atď.). S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
- závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení)
- závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva
- závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja
- prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu
- poškodenie behom transportu alebo nesprávnym skladovaním
- prirodzené opotrebenie čidla
- nutnosť kalibrácie detektora

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: **032/381 00 75**

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je treba predložiť Záručný list a sprievodný list s popisom závady spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom!



Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

tel: **032/381 00 75**, fax: 032/230 16 81
e-mail: objednavky@tester.sk, web: www.testersk