

## ALKOHOL TEST

Detekčné trubičky pre orientačnú dychovú skúšku

Návod na použitie trubičiek

### **ALKOHOL TEST**

**Trubičky slúžia na jednorázové orientačné zisťovanie alkoholu v dychu.**

#### **Postup skúšky:**

1. Z oboch strán trubičky sa odstránia zátky.
2. Do ústia odmerného sáčku sa zasunie trubička ( v smere šípky, ktorá je vyznačená na trubičke ) a z druhej strany sa nasunie náustok.
3. Fúkaním do trubičky v priebehu cca 20 až 40 sek. sa naplní obsah balónika vzduchom až do získania maximálneho objemu. Pri používaní sa trubička silne zahrieva.
4. Výsledok skúšky sa vyhodnotí až po jednej minúte po naplnení sáčku.

#### **Vyhodnotenie:**

- ◆ Sfarbenie najtmavších zŕn v náplni sa porovná s etalónom na krabičke ,alebo na trubičke.
- ◆ Intenzita sfarbenia náplne je závislá na množstve alkoholu v dychu.

#### **Upozornenie:**

- ◆ Trubičky slúžia iba na jednorázové použitie.
- ◆ Po bezprostrednom požití ovocných štiav ,dezertov a zákuskov s náplňou likérov, fajčení, čistení zubov alebo použitím ústneho dezodorantu je čas skúšky potrebné preložiť o 15 min.
- ◆ Minimálna potrebná teplota trubičky pri skúške je +15 °C .
- ◆ Vyvarujte sa priamemu kontaktu s kryštalickou náplňou trubičky pretože obsahuje žieravinu. Pri nešetrnom zaobchádzaní môže dôjsť ku zčerveňaniu pokožky alebo poškodeniu odevu.
- ◆ Po použití je žiaduce trubičky odstrániť do odpadu.
- ◆ Chráňte pred deťmi.

#### **Skladovanie:**

Skladovať v pôvodných obaloch, na suchom mieste s teplotou od +5 do +30 °C.  
Doporučená doba spotreby trubičiek je uvedená na krabičke.